 **SWISSFLEX**[®]
e y e w e a r



perfekte Passform
modulare Individualität
100% Swiss-made



like
wearing
nothing.

Swissflex Varius System & Kollektion





System SF varius



SFV 01



SFV 02



SFV 03




SFV 04



SFV 05

SF varius / Passformsystem

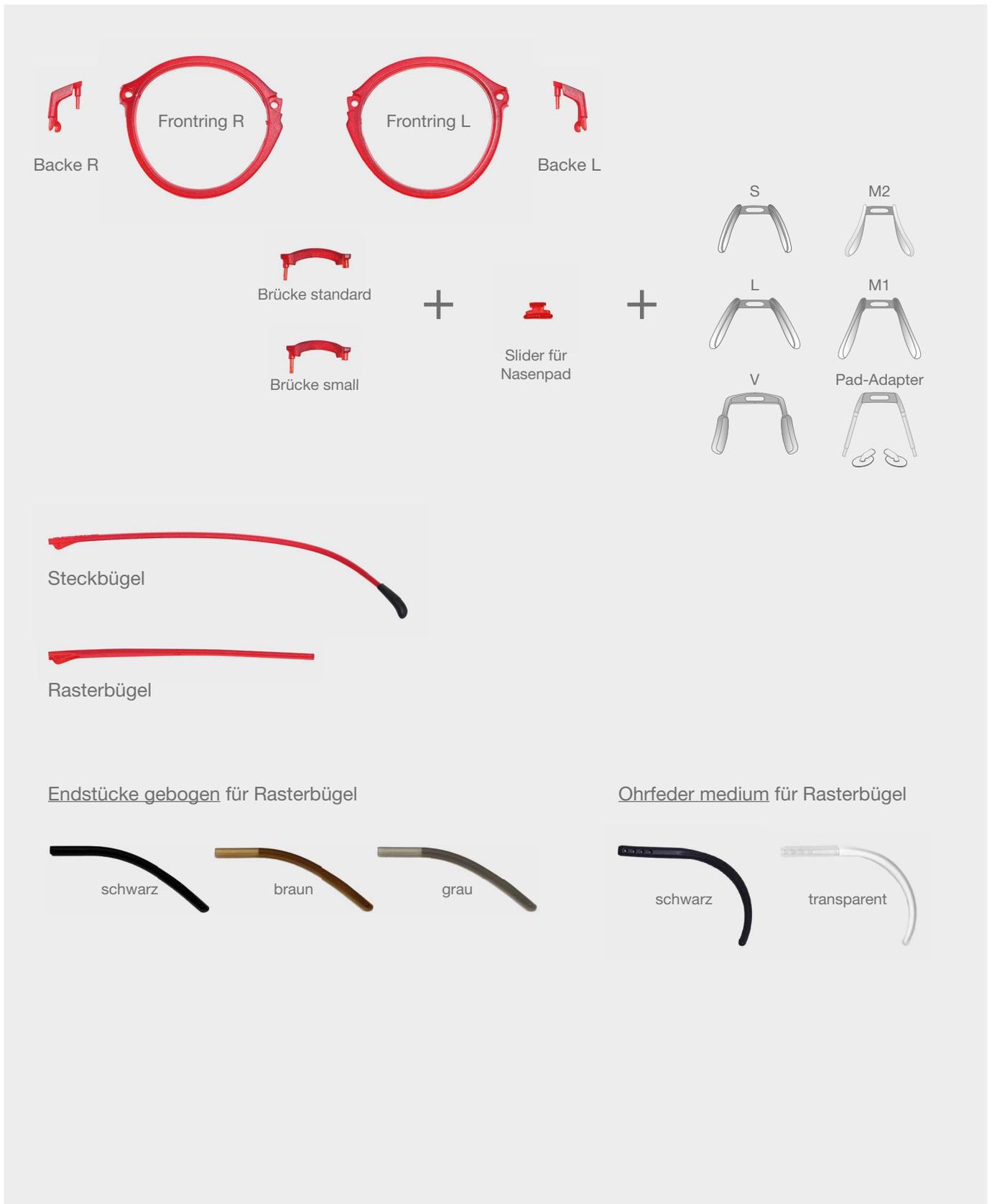

SF varius / Fassungssystem



SF varius / Glasformen



V-01
47



V-04
45



V-02
43



V-05
47




V-03
44

SF varius / Farben matt



19 smokey

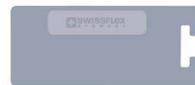

64 steel-blue



37 cinnamon



67 crimson



50 translucent



75 whitesmoke



52 brownish



89 white pearl



60 black



113 white coffee

Montage und Demontage

Nasenpad SF varius

Der Nasenpad ist nicht mit dem klassischen Pilz sondern mittels Slider mit dem Mittelteil verbunden.




Slider-System

Der Nasenpad samt Slider kann mit dem Daumen leicht ein- und ausgeklickt werden.


Bügel

Backe bzw. Front fixieren und Bügel ruckartig - bis zum Aus-/Einklicken - in Öffnungsrichtung des Scharniers ziehen/drücken.

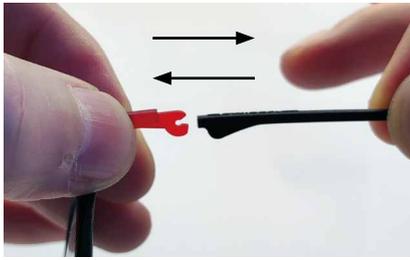

Endstücke und Ohrfedern

Bei Kinderbrillen (v.a. Babybrillen) empfehlen wir aus Sicherheitsgründen das Ankleben der Ohrfedern mit Klebstoff.

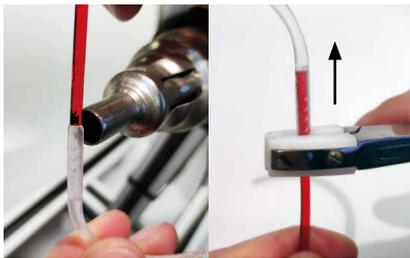

Montage und Demontage

Zur Montage die Ohrfeder einseitig erwärmen und über das Bügelende schieben.

Zur Demontage die Ohrfeder mit einer Zange wegschieben (nicht ziehen!).




Befestigung mit Kleber

Einen winzigen Tropfen des Klebers CB2008* auf die Schnittfläche des Rasterbügels auftragen und die Ohrfeder innerhalb von 2 Sek. aufsetzen.

* Exklusiv für Swisflex entwickelt: Biokompatibel, macht das Material nicht brüchig und ist in Aceton löslich.

Anpassung und Reinigung

Der besondere Tragekomfort beruht auf der optimalen Anpassung an das jeweilige Gesicht. Alle Fassungselemente können durch leichtes Erwärmen individuell geformt werden.

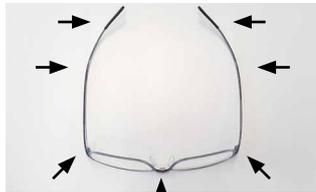

Mögliche Anpassungsbereiche

- Front (zuerst Nasenpad entfernen)
- Bügel
- Endstücke
- Bei den Nasenpads ist nur der Pad-Adapter und der Pad V erwärm-/anpassbar.




Backen anpassen

- Durch mehrmaliges Drehen beide Seiten gleichzeitig erwärmen
- Scharnierbereich (Front und Bügel) nicht erwärmen
- Temperatur auf Abstand anpassen
- Glas abdecken/schützen



Bügel und Ohrfeder anpassen

- Durch mehrmaliges Drehen beide Seiten gleichzeitig erwärmen
- bereits beim Erwärmen leicht in die gewünschte Richtung biegen

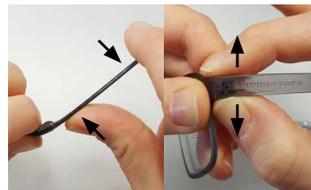

Öffnungswinkel verändern

An der erwärmten Ecke den Winkel nach Bedarf vorsichtig anpassen.

Inklination verändern

An der erwärmten Ecke die Inklination nach Bedarf anpassen.

Reinigung



Reinigung der Gläser

Brücke und Backe des zu reinigenden Glases fixieren (Rotationsbewegung zwischen Glas und Fassungsteilen verhindern).

Seife und Wasser

Aceton

Alkohol



Reinigung der Fassung

Reinigung der Fassung mit Wasser und Seife und ev. Anzeichnungen/Kleberückstände an der Fassung mit Aceton entfernen.



Vertrieb Swissflex Eyewear Schweiz

Vinexio GmbH
Binzstrasse 67
8712 Stäfa
Tel. 044 536 02 25
www.vinexio.ch
welcome@vinexio.ch



Einschleifservice, Reparaturen
und Ersatzteile

Vinexio Atelier
Landstrasse 20
9496 Balzers
Tel. 044 585 97 79
www.vinexio.ch
atelier@vinexio.ch